

体調管理アプリ「GLOBAL SAFETY」のイベント登録方法

イベント登録の方法は以下のとおりです。

■ キーワードで検索する場合

※ 組織 / イベント登録を行う場合、基本情報の入力が必要になります。



①【イベント】をタップ



② 指定されたキーワードで検索



③ 表示されたイベントから登録する種別を選択し、登録

QRコード
検索



■ QRコードからの登録
アプリ画面・下「QR」をタップし、「カメラ起動」

①表示イベント「いわて八幡平白銀国体（特別国民体育大会冬季大会スキー競技会）」をタップ

②「参加登録」をすべての項目を選択し、登録

■ 参加種別 1
「監督・選手・チームスタッフ」を選択

■ 参加種別 2
「東京都」を選択

■ 参加種別 3
自身の「該当区分」を選択

キーワード
検索

5xsuta3g4m

【昨年も国体に参加した方へ】 マイページの作成についての注意事項

■ PCR検査実施マニュアルP5補足事項

マイページを作成する際、**必ずこのQRコードからログインして登録**してください。

OK

1

「A ご案内」下部記載のQRコードを読み込む

キット内容物

- A ご案内(本紙)
- B 唾液採取容器(1次容器)
※ I II どちらかの形状のもの一点
- C 不活化液
- D バーコードシール(3枚)
①本紙に貼り付け(ご本人使用)
②唾液採取容器に貼り付け
③返送専用箱に貼り付け
- E 吸水マット
- F パウチ袋(2次容器)
- G 輪ゴム
- H 返送専用箱(3次容器)
- I セキュリティシール
- J ゆうパケット伝票シール
- K 宛名シール

唾液採取から発送手順

注意

- 唾液採取前30分は、飲食・喫煙・歯磨き(マウスウォッシュ)は行わないでください。
- 唾液は「手順3」に記載された必要量を入れてください。唾液の量が少ないと、検査が出来ないことがあります。
- 唾液採取後は速やかに発送してください。検査精度が低下する場合があります。

1 スクリーンショット下部のQRコードを読み取り、マイページへログインする。本紙裏面にバーコードシールを1枚貼る。(使用)


2 袋から唾液採取容器とストローを取り出す。(これ以降、容器I IIともに手順は同様です)

※内容物のイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。

木下グループ 新型コロナウイルス(COVID-19) PCR検査キット -NM

ご案内 表面 裏面もご確認ください

必ずここから
ログインする！

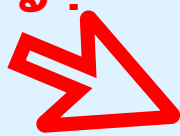

NG

木下グループPCR検査センター

マイページ

再予約を行う

ゆうパケット

登録中の申込者情報

最新の検査結果を確認

ご予約日時	郵送利用の方は、検査完了メールをお待ちください
団体利用確認	いいえ
団体コードの入力	-
団体記号	-

マイページ下部の
「バーコード番号及び
ゆうパケット番号変更」
から登録してはいけません。



バーコード番号及び
ゆうパケット番号変更

木下PCR検査センター会員の退会をご希望の方はコチラ